

- Kula łokciowa - aluminiowa AR-010
- Kula łokciowa - aluminiowa z miękkim uchwytem Softi. AR-010M
- Kula łokciowa - aluminiowa z ruchomą obejmą AR-024
- Kula łokciowa - aluminiowa z ruchomą obejmą i miękkim uchwytem Pro-Soft. AR-024M
- Kula łokciowa - aluminiowa z ruchomą obejmą, ergonomiczny uchwyt AR-025

Przeznaczenie oraz opis wyrobu:

Kule łokciowe przeznaczone są dla osób, które potrzebują wsparcia podczas nauki chodzenia po urazach kończyn dolnych do utrzymania równowagi oraz przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo-ortopedycznych (złamaniach, zwichnięciach, skręceniach). Wykonane są z dwóch wytrzymałych i lekkich rurek aluminiowych, uchwyty z tworzywa oraz nasadki gumowej (antypoślizgowej). Dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej mieszanki gumowej, nasadki antypoślizgowe doskonale amortyzują wstrząsy. Technologia lakierowania gwarantuje trwałość lakieru oraz estetyczny wygląd przez długi czas.



Przeciwwskazania:

Przeciwwskazania do pionizacji, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na kuli, zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa.

Dane użytkowe: Maksymalny ciężar pacjenta zapewniający bezpieczne korzystanie z kuli łokciowej: **120 kg**



Uwagi i ostrzeżenia:

W celu uniknięcia wypadku prosimy o:

1. Sprawdzenie czy wszystkie elementy są w całości, nie nadłamane (np. w transporcie)
2. Sprawdzenie czy wszystkie elementy z tworzywa nie posiadają uszkodzeń np. pęknięć
3. Sprawdzenie czy kula posiada założoną nasadkę gumową antypoślizgową
4. Sprawdzenie czy główka zatrzasku do regulacji wysokości znajduje się w wyciętym otworze



W celu uniknięcia urazów:

1. Niezbędne jest każdorazowe sprawdzenie stanu technicznego, stabilności wyrobu przed użyciem (sprawdzenie wszystkich elementów).
2. Używać tylko po dopasowaniu właściwej wysokości do użytkownika.
3. Zachować szczególną ostrożność na mokrej lub śliskiej powierzchni.
4. Nie wolno przeciążać wyrobu, przekraczać maksymalnego obciążenia określonego przez producenta.

5. Należy używać kuli tylko i wyłącznie w pozycji „zablokowanego” zatrasku” regulacji wysokości.
6. Przy poruszaniu się należy szczególnie uważać na leżące dywaniki, części garderoby, zabawki itp., jak również leżące zwierzęta, nierówne, popękane powierzchnie.

Sposób konserwacji:

Kulę łokciową należy czyścić regularnie używając tylko i wyłącznie wody i łagodnych detergentów posiadających atest PZH. Po dokonaniu takiej czynności kulę należy wytrzeć/ osuszyć delikatną szmatką. Nie wolno używać środków ściernych! Elementy gumowe (nasadka gumowa antypoślizgowa) jest elementem zużywalnym i musi być regularnie wymieniana na nową.

Incydenty:

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Utylizacja:

Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu:

W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.