

Officina Prodotti Ortopedici S.r.l.

Via Bellini 33, Rastignano (Bologna - Włochy)

<http://www.oposrl.it>

## PRZEZNACZENIE

Ta kula służy jako pomoc w chodzeniu i jest wyrobem medycznym klasy I. Kula jest składana, dzięki czemu można ją schować do walizki lub przechowywać, gdy nie jest używana.

## PRZECIWSKAZANIA I OSTRZEŻENIA

Sposób użytkowania i dopasowanie kuli zależy od indywidualnych warunków użytkownika; dla osób używających kuli po raz pierwszy konieczne jest, aby personel medyczny dokonał regulacji wysokości i udzielił instruktażu. Ocena przydatności przez personel medyczny jest konieczna w przypadku osób z problemami psychomotorycznymi oraz użytkowników protez lub ortez kończyn dolnych. U niektórych osób długotrwałe użytkowanie może powodować choroby stawów; jeśli odczuwasz ból w dłoni, nadgarstku, łokciu lub ramieniu - zaleca się przerwanie użytkowania i konsultację lekarską.

- Nie używać bezpośrednio na uszkodzoną skórę
- Aby uniknąć upadków, zwracaj uwagę na mokre i śliskie powierzchnie
- Nigdy nie używaj uszkodzonego sprzętu
- Unikaj zanurzania w wodzie - dostaje się ona do wnętrza i zalega
- Regularnie sprawdzaj stan wewnętrznej linki elastycznej. Jeśli uszkodzona - wymień kulę.

W razie wypadku lub awarii skontaktuj się z producentem.

## SKŁADANIE I ROZKŁADANIE

Kula jest zazwyczaj złożona w torbie i podzielona na dwie części połączone elastyczną linką. Pierwszym krokiem jest złożenie dwóch części. Aby to zrobić, wykonaj poniższe kroki i kieruj się ilustracjami z boku:

- Wyrównaj rurki i wsuń jedną w drugą, pozwalając elastycznej linie połączyć elementy
- Włóż bolce w rowki (patrz Fig. 2)

Aby złożyć kulę - wykonaj operację odwrotnie.

## REGULACJA WYSOKOŚCI

Regulacja zależy od wzrostu pacjenta, komfortu i indywidualnej mobilności. Wykonaj kroki przedstawione na Fig. 3:

1. Odczep zaczepek blokujący z jego gniazda (1) w rurce

2. Nie używaj narzędzi (patrz Fig. 4)
3. Odkręć pierścień mocujący (2)
4. Dostosuj wysokość, przesuwając teleskopowe rurki i dopasowując otwory (3)
5. Włóż z powrotem zacpek blokujący (4)
6. Dokręć pierścień, aby zablokować (5)

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

**Czyszczenie:** Regularnie czyść uchwyt i podpórkę przedramienia neutralnym mydłem; nie używaj alkoholu ani rozpuszczalników. W przypadku przedostania się wody do wnętrza – rozłóż rurki i końcówkę, a następnie wysusz.

**Końcówka:** Końcówka stykająca się z podłożem zużywa się – zaleca się jej okresową wymianę na oryginalne części zamienne.

**Ponowne użycie:** Produkt nadaje się do wielokrotnego użytku po dezynfekcji, wymianie końcówki i sprawdzeniu, czy kula jest w dobrym stanie. Jeśli masz wątpliwości – nie używaj.

**Dezynfekcja:** Usuń resztki z uchwytu i mankietu, dezynfekuj produkt preparatami z niskim stężeniem podchlorynu sodu.

**Przechowywanie:** Przechowuj kule w czystym i suchym miejscu.

