



Instrukcja użycia kula przedramienna GANYMED®PL

1. Przeznaczenie i wskazanie - strona 2
2. Przeciwwskazania - strona 2
3. Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa - strona 2
4. Regulacja pomocy w chodzeniu - strona 2
5. Użytkowanie - strona 3
6. Środek zapobiegawczy - strona 4
7. Przechowywanie i pielęgnacja - strona 4
8. Ograniczenie użytkowania - strona 5
9. Ponowne wykorzystanie (wynajem) / czas użytkowania - strona 5
10. Gwarancja i odpowiedzialność - strona 5
11. Utylizacja – strona 5
12. Dane techniczne – strona 5
13. Części zamienne i opis dostępnych modeli – strona 6
14. Katalog symboli – strona 7

Pomoc do chodzenia GANYMED® jest rozpoznawalna przede wszystkim po swoim designie i pod tym względem znacznie różni się od klasycznych pomocy do chodzenia na przedramionach. Służy do częściowego lub całkowitego odciążenia dolnych partii ciała i stanowi wsparcie w przypadku trudności z koordynacją i zaburzeniami równowagi. Dzięki przemyślanej funkcji i konstrukcji, pomoc do chodzenia GANYMED® oferuje wiele zalet w porównaniu z klasyczną kulą na przedramieniu.

Poniższe instrukcje zawierają opisy dotyczące prawidłowej regulacji kuli GANYMED®, wyjaśnienia dotyczące prawidłowego użytkowania oraz wskazówki, jak cieszyć się GANYMED® przez długi czas.

1. Przeznaczenie i wskazanie

Nasze pomoce do chodzenia są przeznaczone dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z upośledzeniem ruchów, zaburzoną równowagą z wystarczająco nienaruszoną zdolnością chodzenia i upośledzoną koordynacją. Stosuje się je w celu utrzymania, wspomaganie i stabilizacji chodu lub w celu częściowego lub całkowitego odciążenia kończyn dolnych. Pomoce do chodzenia mogą być używane zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Konieczne jest również przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa!

2. Przeciwwskazania

Stosowanie pomocy do chodzenia jest nieodpowiednie, jeśli dochodzi do utraty kończyny w obu ramionach lub przykurczów stawów/uszkodzenia stawów w obu ramionach.

Rys. 1

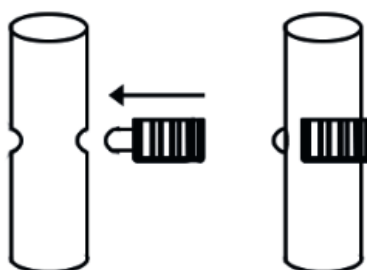


Fig. 1

3. Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa


Nie wieszaj żadnych toreb, woreczków ani innych przedmiotów na pomocy do chodzenia! Pomoce do chodzenia nie mogą być w żadnym wypadku używane do celów innych niż te, do których są przeznaczone, np. do podnoszenia lub przenoszenia przedmiotów lub jako narzędzie do włączania świateł lub naciskania przycisków na windach! Istotne jest, aby podłoże miało dobrą przyczepność, aby zapewnić bezpieczne trzymanie pomocy do chodzenia! Unikaj mokrych podłóg lub powierzchni, takich jak żwir, piasek, liście, lód lub śnieg! Zwróć uwagę na punkty potknięcia, takie jak nierówności, w podłodze, luźne wykładziny podłogowe lub krawędzie, ponieważ pomoc do chodzenia może nieoczekiwanie się ześlizgnąć lub zapadnąć! Zaleca się szczególną ostrożność, gdy warunki oświetleniowe są niewystarczające, ponieważ nierówności podłoża można wtedy dostrzec tylko z trudem! Otwory do regulacji pomocy w chodzeniu ulegają pewnemu zużyciu. Ważne jest, aby upewnić się, że nie są zużyte. Plastikowy klips musi mieć dodatnie pasowanie po włożeniu (rys. 1)!

4. Regulacja pomocy w chodzeniu

Ostrzeżenie! Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby zapewnić prawidłowe funkcjonalne i ergonomiczne dopasowanie! Nieprawidłowo wyregulowane pomoce do chodzenia mogą ograniczać funkcjonalność pomocy do chodzenia lub prowadzić do przeciążenia lub nieprawidłowego obciążenia pacjenta! Pomoce do chodzenia są przekazywane Państwu jako pacjentowi w odpowiednim stanie, przy czym są indywidualnie dopasowywane do Państwa ciała przez specjalistę lub lekarza specjalistę. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy tak jest, prosimy o kontakt z odpowiednim personelem specjalistycznym. Pomoc do chodzenia może przynieść Ci ulgę, której pragniesz, tylko wtedy, gdy jest optymalnie dostosowana do Twojego rozmiaru ciała.

Regulacja: Odblokuj regulację wysokości, wypychając klips. Dostosuj długość podpór do wielkości ciała, wyciągając rurki nośne lub dociskając je do siebie. Ponownie zablokuj regulację wysokości, ustawiając rurki w taki sposób, aby dwa otwory blokujące znajdowały się jeden na drugim. Włóż ponownie klips. Gumowa stopka może być obracana w celu uzyskania mocniejszej lub bardziej miękkiej rolki w gnieździe (rys. 2). Przetestuj sam, co jest dla Ciebie wygodniejsze.

Uwaga: Ryzyko upadku z powodu wybożenia pomocy do chodzenia, gdy regulacja wysokości nie jest prawidłowo zablokowana! Sprawdź poprawność zablokowania po każdej regulacji, próbując przekręcić lub przesunąć wspornik!

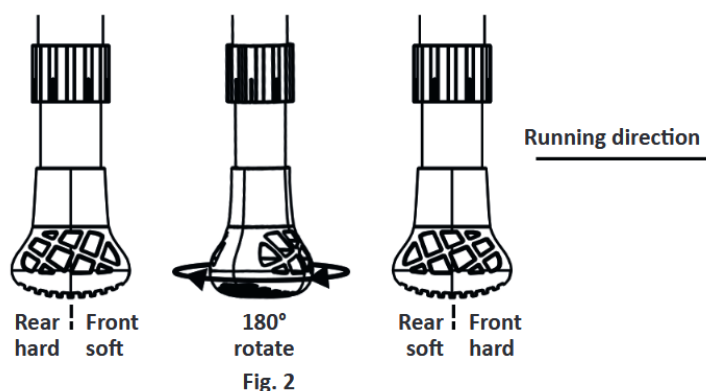

5. Obsługa kul:

Istnieje wiele różnych sposobów korzystania z pomocy do chodzenia i wszystko zależy od indywidualnych ograniczeń zdolności chodzenia. Zasięgnij instrukcji dotyczących korzystania z pomocy do chodzenia u swojego specjalisty lub specjalisty opieki zdrowotnej! Nie wolno używać pomocy do chodzenia w wodzie. Każda przenikająca woda może prowadzić do powstawania korozji, a co za tym idzie do zwiększonego ryzyka pęknięcia. Unikaj długotrwałego kontaktu pomocy do chodzenia z wilgocią. Pomoce do chodzenia muszą być odpowiednio wysuszone, gdy mają kontakt z wodą. Prawidłowe obchodzenie się z pomocami do chodzenia wymaga pewnej wprawy. Dlatego zalecamy na początku skorzystanie z dodatkowego wsparcia asystenta. Zalecamy używanie pomocy do chodzenia w parach, gdy potrzebujesz wsparcia po obu stronach! Jednak w praktyce ogólnej należy stosować tylko jedną podparcie, a następnie zawsze po stronie przeciwnej do kontuzjowanej nogi lub nogi, którą należy chronić! Prowadź pomoce do chodzenia blisko ciała, a nie pod kątem skierowanym na zewnątrz (rys. 3)! W przeciwnym razie możesz spaść!

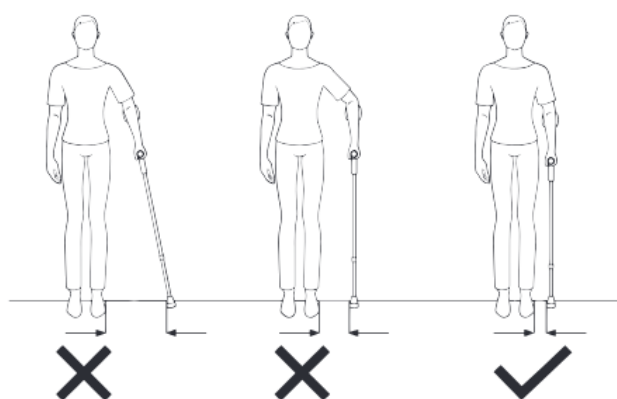


Fig. 3

Podczas użytkowania chwyć ręką uchwyt(y) przyrządu (aparatu) do chodzenia całkowicie i mocno! Zawsze umieszczaj pomoce do chodzenia tak prosto, jak to możliwe na ziemi, aby się nie wyślizgnąć! Znajdź krzesła z podłokietnikami, na których możesz usiąść. Będziesz wtedy mógł podeprzeć się na podłokietnikach podczas wstawania! Noś buty, które są tak wygodne, jak to tylko możliwe, z płaską podeszwą, aby Twoja noga lepiej wytrzymała dodatkowe obciążenie! Jeśli upadniesz: jeśli to możliwe, pozwól pomocy do chodzenia opaść na bok, abyś na nią nie upadł! Niech ktoś będzie Ci towarzyszył i wspierał, jeśli to możliwe, aby mógł Cię złapać, jeśli upadniesz! Postaraj się o wykwalifikowany personel, który poinstruuje Cię, jak wchodzić po schodach z pomocą do chodzenia! Podczas wchodzenia po schodach z tylko jedną pomocą do chodzenia ważne jest, aby wolną ręką trzymać się poręczy (rys. 4)! Podczas wchodzenia po schodach z dwoma pomocami do chodzenia, trzymaj oba pomoce do chodzenia razem w jednej ręce i upewnij się, że mocno trzymasz się poręczy wolną ręką (rys. 5)!

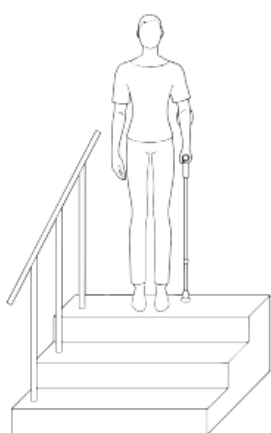


Fig. 4

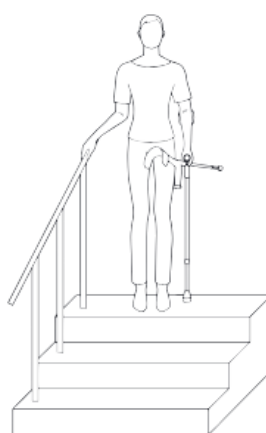


Fig. 5

6. Środek zapobiegawczy

Korzystanie z pomocy do chodzenia powoduje niezwykle obciążenie poszczególnych części ciała! Może to spowodować następujące niepożądane skutki uboczne: Dłonie, ramiona lub ubrania mogą być uciskane lub otarte! Jako środki zapobiegawcze zalecamy stosowanie nakładek na uchwyty i wsporniki. Korzystając z dwóch pomocy do chodzenia, upewnij się, że dźwigasz cały ciężar ciała rękami i barkami! Pamiętaj, że może to prowadzić do bólu i nadmiernego wysiłku na początku lub podczas długotrwałego wysiłku! Ważne jest, aby robić wystarczająco dużo przerw!

7. Przechowywanie i pielęgnacja

Nigdy nie przechowuj pomocy do chodzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piece, grzejniki lub w miejscach narażonych na nagrzewanie się w samochodzie! Nie wystawiaj pomocy do chodzenia na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas! Silne słońce lub ciepło uszkadza plastik! Chron swoje pomoce do chodzenia przed przewróceniem się i uszkodzeniem lakieru (np. za pomocą pasków lub uchwytów). Gumowa stopka jest częścią zużywającą się i należy ją wymieniać w regularnych odstępach czasu. Pomoce do chodzenia mogą być ponownie używane tylko po dłuższym okresie nieużywania, po uprzedniej kontroli przez wykwalifikowany personel! Ostrzeżenie! Nigdy nie czyść uchwytów i gumowej stopy substancjami olejnymi! Istnieje ryzyko poślizgnięcia się! W przypadku zanieczyszczenia należy wyczyścić pomoce do chodzenia łagodnym środkiem czyszczącym i w razie potrzeby miękką szmatką. Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki,

ponieważ mogą one uszkodzić plastik! Uwaga: Jeśli wymagana jest dezynfekcja, należy użyć odpowiedniego środka dezynfekującego. Należy postępować zgodnie z instrukcją użytkownika producenta.

8. Ograniczenie użytkowania

Pomoc do chodzenia może być poddawana obciążeniom wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta. Przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej masy ciała podanej na produkcie! W przypadku większych obciążeń lub w razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z wyspecjalizowanym sprzedawcą. Pod żadnym pozorem nie wolno używać wygiętych lub uszkodzonych pomocy do chodzenia, ponieważ nie są one w stanie zapewnić niezbędnej stabilności! Nie wolno również prostować wygiętych pomocy do chodzenia ze względu na ryzyko złamania! Uwaga: Wszystkie poważne incydenty, które mają miejsce w związku z produktem, muszą być zgłaszane producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym znajduje się użytkownik i/lub pacjent.

9. Ponowne wykorzystanie (wynajem) / czas użytkowania

Zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za pierwsze wprowadzenie naszych produktów do obrotu. Zgadzamy się na ponowne wykorzystanie tylko wtedy, gdy wcześniej sprawdziliśmy produkt. Żywność kul przedramienia jest ograniczona do 2 lat. Po tym czasie użytkownik jest odpowiedzialny za dalsze korzystanie z pomocy do chodzenia podpartego przedramieniem.

10. Gwarancja i odpowiedzialność

Kupiłeś wysokiej jakości produkt Ossenberg. W przypadku uzasadnionej wady materiałowej pomimo najwyższych standardów jakości, Ossenberg zastrzega sobie prawo, w ramach 12-miesięcznej gwarancji, do naprawy wadliwego towaru lub wymiany go na wolną od wad dostawę następczą, według własnego uznania. Należy pamiętać, że do naszych wyrobów gotowych, w szczególności produktów na zamówienie, mają zastosowanie bardziej rygorystyczne przepisy prawne. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane modyfikacjami naszych produktów. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających ze zużycia lub niewłaściwej obsługi. Części zużywające się są wyłączone z gwarancji. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów! Skontaktuj się z wyspecjalizowanym sprzedawcą w celu uzyskania części zamiennych, akcesoriów i napraw.

11. Utylizacja

Skonsultuj się z wyspecjalizowanym sprzedawcą w sprawie regionalnych przepisów dotyczących utylizacji.

12. Dane techniczne

SZEROKOŚĆ MANKIETU - 9 cm

MANKIET DO UCHWYTU - 22 cm

UCHWYT DO PODŁOGI - regulowany od 77 cm - 99 cm; 10-krotny klips przelotowy

GUMOWA STOPKA - Art. 3002

- Obciążenie do 120 kg masy ciała

WAGA - 1200 g / para

13. Części zamienne

Art. 3001 GONYMED® Gumowa stopka Super Soft w kolorze czarnym

Art. 3002 GANYMED® Gumowa stopka Soft w kolorze czarnym

Art. 3004 Klip z GANYMED®

Art. 3006 GANYMED® Tuleja prowadząca

- **Model Independent „Niezależny”**

Ergonomiczny miękki uchwyt, który można używać po obu stronach.

Art. 1001 - struktura szara

Art. 1006 - struktura

- **Model Benchmark „Wzorcowy”**

Miękki uchwyt anatomiczny, do użytku na lewą i prawą rękę.

Art. 1003 - struktura szara

Art. 1008 - struktura


- **Model Masterpiece "Dzieło sztuki"**


Miękki, anatomiczny uchwyt wykonany z korka, do użytku na lewą i prawą rękę.

Art. 1004 - struktura szara


Art. 1009 - konstrukcja


14. Katalog symboli


Numer artykułu – 


Producent – 


Numer partii – 


Data produkcji – 


Przeczytaj instrukcję obsługi – 

Dopuszczalna masa ciała – 

Uwaga – 

Dystrybucja przez – 

Wyrób medyczny – 

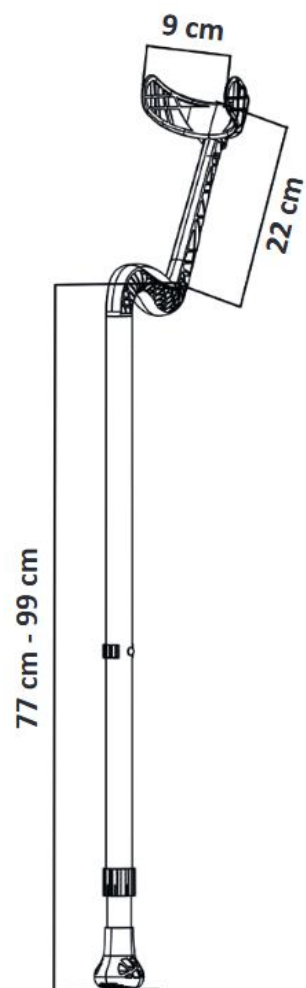

Ten produkt jest zgodny z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR)

