



Instrukcja obsługi - LASKI INWALIDZKIE drewniane - CLASSIC CANES

Przeznaczenie:

Laski inwalidzkie przeznaczone są dla osób o lekko utrudnionej możliwości poruszania się, utrzymania równowagi, jednakże zachowujących zdolność chodzenia w stopniu wystarczającym oraz dla osób z zaburzeniami koordynacji ruchowej. Służą one do utrzymania, wspierania i zabezpieczania chodzenia lub do częściowego odciążenia jednej z kończyn dolnych. Laski inwalidzkie mogą być używane zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. **Prosimy o przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa!**

Wskazania:

- utrata niezależności wynikająca z ograniczonych zdolności ruchowych,
- niewielkie zaburzenia równowagi i/lub wady postawy,
- problemy z przemieszczaniem się.

Przeciwwskazania:

Lasek inwalidzkich nie stosuje się w przypadku utraty obu kończyn górnych lub przykurczu/uszkodzenia stawów obu kończyn górnych.

- nie używaj produktu w przypadku ciężkich zaburzeń poznawczych,
- nie używaj produktu w przypadku dużych problemów z zachowaniem równowagi,
- nie używaj produktu w przypadku dużych zaburzeń motorycznych lub percepcyjnych,
- nie używaj produktu w przypadku osłabienia kończyn górnych.

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Na lasce inwalidzkiej nie należy wieszać żadnych toreb, worków ani innych przedmiotów. Laski inwalidzkiej **nie należy używać do celów innych niż te, do których jest przeznaczona**, np. do podnoszenia lub przesuwania przedmiotów lub jako pomocy w przelączaniu włączników światła albo przyciskania przycisków windy! Przyczepność do podłoża jest kluczowa dla bezpiecznego trzymania laski inwalidzkiej! Należy unikać wilgotnych powierzchni lub podłoży takich jak żwir, piasek, liście, lód czy śnieg! **Prosimy zwrócić uwagę na miejsca grożące potknięciem się**, takie jak nierówności, dziury w podłożu, luźne wykładziny podłogowe lub krawędzie, ponieważ laska inwalidzka może niespodziewanie ześlizgnąć się lub ugrzęznąć! Szczególną ostrożność należy zachować w warunkach niedostatecznego oświetlenia, ponieważ nierówności na powierzchniach są wtedy słabo widoczne!

Zastosowanie:

Zastosowanie laski inwalidzkiej może być bardzo różne i zależy od indywidualnych ograniczeń zdolności chodzenia. Należy zwrócić się do specjalisty lub personelu medycznego o instrukcję w zakresie obsługi laski inwalidzkiej! Nie wolno korzystać z laski inwalidzkiej w wodzie. Należy unikać stałego kontaktu laski inwalidzkiej z wilgocią. W przypadku zawilgocenia należy ją odpowiednio wysuszyć. Prawidłowa obsługa laski inwalidzkiej wymaga nieco praktyki. Dlatego zalecamy, aby na początku użytkowania zapewnić sobie wsparcie drugiej osoby. Laski inwalidzkiej należy używać zawsze po przeciwnej stronie do chorej lub nadwężonej nogi! Laskę inwalidzką należy prowadzić blisko ciała, a nie ukośnie na zewnątrz! W przeciwnym razie może dojść do upadku! Przy korzystaniu uchwyt laski inwalidzkiej należy trzymać mocno całą dłoń! Laskę inwalidzką należy zawsze stawiać na podłożu w pozycji pionowej, aby się nie ześlizgnęła! Należy siadać na krzesłach z podłokietnikami. Przy wstawaniu można się o nie podeprzeć! Należy nosić wygodne buty na płaskim obcasie, aby noga mogła lepiej poradzić sobie z dodatkowym obciążeniem! **Jeżeli dojdzie do upadku:** Laskę inwalidzką należy w miarę możliwości odrzucić na bok, aby na nią nie upaść! Jeżeli jest to możliwe, powinna Państwu towarzyszyć druga osoba, aby w razie ewentualnego upadku Państwa podtrzymać! Wspecjalizowany personel powinien w miarę możliwości pokazać Państwu, jak wchodzić o lasce po schodach! Podczas wchodzenia po schodach o jednej lasce należy koniecznie trzymać się wolną ręką poręczy. W przypadku wchodzenia po schodach przy użyciu dwóch lasek inwalidzkich należy wziąć obie laski w jedną rękę, a wolną ręką koniecznie trzymać się poręczy!

Środki ostrożności:

Korzystanie z laski inwalidzkiej powoduje silne obciążenie poszczególnych partii ciała! Może to powodować niepożądane skutki uboczne: Na dłoniach mogą powstać odgniecenia lub otarcia! Należy pamiętać, że na początku jej stosowania lub przy długotrwałym obciążeniu może to prowadzić do bólu i przemęczenia! Zalecamy robienie przerw!

Bezpieczeństwo:

- ZAWSZE skonsultuj się z lekarzem lub sprzedawcą aby doprecyzować prawidłową regulację oraz wysokość produktu,
- nie przechowuj produktu na zewnątrz ani nie wystawiaj na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
- sprawdzaj regularnie stan wizualny,
- podczas użytkowania trzymaj uchwyt pewnie i całą dłoń,
- w razie upadku – pozwól lasce upaść na bok, abyś nie upadł razem na nią,
- poruszaj się spokojnie, małymi krokami, upewniając się, że kontrolujesz równowagę,
- nie używaj laski na mokrej i śliskiej nawierzchni (woda, śnieg, lód),
- podczas użytkowania zachowaj szczególną ostrożność na nierównej nawierzchni – deformacja gruntu, wystająca płyta chodnikowa, dziury w jezdni itp.,
- nie używaj na schodach – ryzyko poważnych obrażeń,
- używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem – jako pomoc do chodzenia, i we właściwy sposób - nie używaj jako dźwigni,
- przestrzegaj limitu wagi użytkownika umieszczonej na etykiecie produktu lub w instrukcji obsługi,
- dla własnego bezpieczeństwa nie wprowadzaj do produktu żadnych zmian lub modyfikacji,
- po rozłożeniu produktu upewnij się, że wysokość jest dopasowana prawidłowo i wypoziomowana z podłożem,
- nie zawieszaj nic na produkcie w trakcie jego użytkowania,

- ZAWSZE przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź czy produkt jest stabilny,
- nie przechowuj produktu na zewnątrz,
- nasadki gumowe zużywają się i muszą być regularnie wymieniane na nowe (nie podlegają gwarancji).

Przechowywanie i pielęgnacja:

Laski inwalidzkiej nie należy przechowywać w pobliżu źródeł ciepła takich jak piece, kaloryfery lub na kokpicie w samochodzie. Nie wystawiać laski przez dłuższy okres czasu na działanie promieni słonecznych! Silne słońce lub wysoka temperatura powodują uszkodzenia materiału! **Podkładka gumowa ulega zużyciu i musi być regularnie wymieniana.** Po dłuższym czasie niekorzystania z laski można jej używać tylko po uprzednim sprawdzeniu przez wykwalifikowany personel! **Ostrzeżenie!** Nigdy nie czyścić uchwytu ani osłony gumowej substancjami oleistymi! Istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się! W razie zabrudzeń laskę inwalidzką należy czyścić łagodnym środkiem czyszczącym i miękką szmatką. Nigdy nie należy stosować środków czyszczących zawierających rozpuszczalnik, ponieważ można spowodować uszkodzenie drewna! **Informacja:** W przypadku konieczności przeprowadzenia dezynfekcji należy użyć odpowiedniego środka dezynfekującego. Należy przestrzegać instrukcji użytkowania podanej przez producenta.

Ograniczenie użytkowania: Laska inwalidzka może być obciążana jedynie zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta. Należy przestrzegać podanej na produkcie maksymalnej dopuszczalnej masy ciała! W przypadku zapytań dotyczących większych obciążeń lub wątpliwości prosimy o kontakt ze specjalistą. Nie należy używać wygiętej lub uszkodzonej laski ortopedycznej, ponieważ nie zapewnia ona wymaganej stabilności! Ze względu na niebezpieczeństwo złamania wygiętej laski inwalidzkiej nie wolno prostować! **Informacja:** Wszystkie zaistniałe zdarzenia związane z produktem należy zgłaszać producentowi lub właściwemu urzędowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent zamieszkuje.

Gwarancja i odpowiedzialność:

Jeżeli pomimo zachowania najwyższych standardów jakości wystąpi uzasadniona wada fizyczna, firma ma prawo w ramach 12-miesięcznej gwarancji, według własnego uznania, naprawić produkt wadliwy lub dostarczyć produkt nowy i wolny od wad. Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku naszych produktów, w szczególności produktów na zamówienie, obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy prawne. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku modyfikacji naszych produktów. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z zużycia lub nieprawidłowego obchodzenia się z produktem. Części ulegające zużyciu nie podlegają gwarancji. Należy stosować jedynie oryginalne części zamienne i akcesoria! W sprawie części zamiennych, akcesoriów i napraw należy kontaktować się ze sklepem specjalistycznym.

Utylizacja:

Prosimy zapytać swojego specjalistę o lokalne przepisy dotyczące utylizacji.

PRODUCENT:
Classic Canes Limited
Warren House
Hinton St George
Crewkerne
Somerset TA17 8TQ
England
Tel: +44 (0)1460 75686