

Instrukcja Bezpieczeństwa - Ø20 i Ø23 (13120 i 13123)

Produkt: Klip Ø20 i Ø23 do kul Ossenberg Big XL – mix kolor

Kod produktu: 13120 i 13123

Przeznaczenie: Zapasowy klips do kul przedramiennych o średnicy drążka 20 mm lub 23 mm

1. Przeznaczenie produktu

Klip Ø23 mm jest elementem wymiennym przeznaczonym wyłącznie do kul przedramiennych **Ossenberg** o średnicy drążka **20 mm i 23 mm**. Produkt służy do prawidłowego mocowania elementów kuli i zapewnienia jej stabilnego użytkowania.

☐ Produkt nie jest wyrobem medycznym samodzielnie – stanowi część zamienną do sprzętu wspomagającego poruszanie się.

2. Zasady bezpiecznego użytkowania

- Klips należy montować **wyłącznie w kulach kompatybilnych (Ø20 mm lub Ø23 mm)**.
- Przed każdym użyciem upewnić się, że klips jest:
 - prawidłowo zamocowany,
 - nieuszkodzony,
 - stabilnie trzyma element kuli.
- Nie używać klipsa w przypadku:
 - pęknięcia,
 - odkształcenia,
 - poluzowania podczas użytkowania.
- Produkt nie jest przeznaczony do modyfikowania konstrukcji kuli.

3. Ostrzeżenia

- ☐ **Nieprawidłowy montaż klipsa może prowadzić do utraty stabilności kuli i zwiększa ryzyko upadku!**
- ☐ Nie używać klipsa jako samodzielnego elementu nośnego.
- ☐ Nie stosować w kulach innych marek bez potwierdzenia kompatybilności.
- ☐ Produkt nie jest zabawką – przechowywać poza zasięgiem dzieci.

4. Konserwacja i kontrola stanu technicznego

- Klips należy regularnie kontrolować pod kątem pęknięć i luzów.
- Czyścić suchą lub lekko wilgotną szmatką.
- Nie stosować silnych detergentów ani środków chemicznych.
- W razie zużycia należy natychmiast wymienić na nowy egzemplarz.

5. Warunki przechowywania

- Przechowywać w suchym miejscu.
- Chronić przed wysokimi temperaturami oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Nie przechowywać pod dużym naciskiem mogącym spowodować deformację.

6. Odpowiedzialność użytkownika

Producent oraz dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

- stosowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- nieprawidłowego montażu,
- użytkowania zużytego lub uszkodzonego klipsa.

7. Informacje o producencie

Ossenberg GmbH (Niemcy)

Firma istnieje od 1950 roku i specjalizuje się w produkcji kul ortopedycznych oraz lasek. Produkty wytwarzane są w Niemczech i dystrybuowane do ponad 50 krajów na świecie.

Symbolverzeichnis



Artikelnummer



Chargennummer



Lesen Sie die
Bedienungsanleitung



Dieses Produkt erfüllt die
Anforderungen der
Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)



Hersteller



Herstellungsdatum



Achtung



Medizinprodukt



Vertrieb durch



Zulässiges
Körpergewicht



Ossenberg GmbH
Kanalstraße 79
48432 Rheine
GERMANY

Phone +49 (0) 59 71-9 80 46 0
Fax +49 (0) 59 71-9 80 46 16
Internet www.ossenberg.com
E-Mail info@ossenberg.com

This is a product according to the guidelines of the Medical Devices Directive. Furthermore the Ossenberg GmbH is certified according to DIN EN ISO 13485.